


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- [1] Массажный стол Galant
- [2] Полка для рук
- [3] Сумка для транспортировки
- [4] Съёмный регулируемый подголовник
- [5] Валик для заглушки люверса лица
- [6] Инструкция

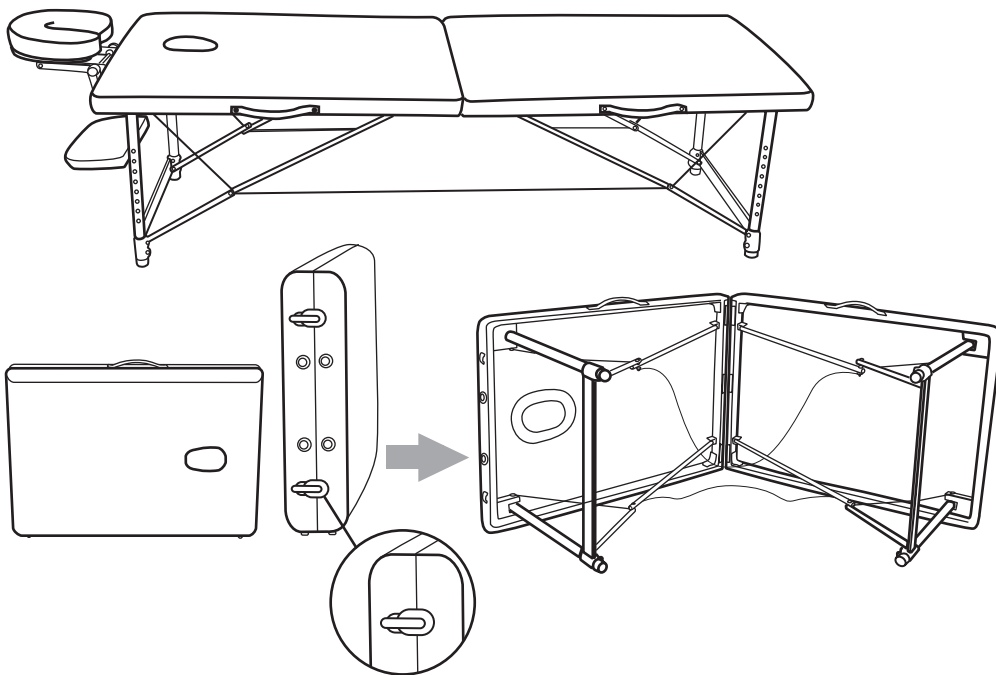

СБОРКА И УСТАНОВКА

1. Отстегните защелки-крепления.
2. Поставьте стол на бок. Раскройте его и вытащите ножки. Полностью раскройте стол и отрегулируйте высоту ножек.
3. Выньте все аксессуары и затем поднимите стол, поставив его ножками на пол.
4. Поместите подголовник в соответствующие отверстия и зафиксируйте подушку на подставке.

ХРАНЕНИЕ / УХОД

Регулярный уход продлит срок службы вашего массажного стола Galant и будет гарантией безопасной эксплуатации на всем протяжении использования.

1. Рекомендованные условия хранения: сухое место, без пыли.
2. Избегайте попадания жидкостей на Galant и воздействия открытого огня.
3. Очищайте массажный стол, используя сухую мягкую ткань.

Гарантия на массажный стол 1 год с даты покупки.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения надлежащего функционирования и оптимального эффекта просим Вас внимательно прочитать следующие инструкции перед применением данного оздоровительного оборудования. Просим Вас сохранить данную инструкцию для последующего использования!

- Складывайте и раскладывайте массажный стол с помощью второго человека.
- Стол должен быть установлен на ровную поверхность.
- Перед каждой сборкой проверяйте крепление винтов, шнуры не должны быть запутаны и перегнуты.
- Не перегружайте стол, это может привести к травме.

- Не используйте для очистки стола средства содержащие алкоголь или растворитель. Это может испортить обивку стола.

- Данный массажный стол соответствует общепризнанным принципам технологии и действующим нормативам техники безопасности.

- Данное оборудование не требует технического обслуживания. Любой необходимый ремонт может быть выполнен авторизованным специалистом. Неправильное использование и несанкционированный ремонт запрещены по причинам безопасности и ведут к аннулированию гарантийных обязательств.

- Избегайте высоких температур и прямых солнечных лучей.

- Мы не несем ответственности за повреждения по причине неправильного или ненадлежащего использования.

- Во избежание чрезмерной нагрузки мышцы и нервные волокна не следует превышать рекомендованную продолжительность сеанса массажа.

- Не используйте заостренных или острых предметов.

- Любого массажа – в том числе и ручного – следует избегать во время беременности и/или при наличии одного или более недомоганий в области массажа: головная боль, недавние травмы, тромботические заболевания, воспаления и опухоли любого типа, включая раковые. Рекомендуется посоветоваться со своим врачом перед лечением любых повреждений или заболеваний.

- Если Вы используете электрические аппараты, например, кардиостимулятор, то перед любым видом применения массажа Вам следует проконсультироваться со своим врачом.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

Соответствует директиве 2006/95/EC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры в рабочем виде:

195 x 59 – 81 x 70 см

Размеры в собранном виде: 98 x 70 x 18 см

Размеры в коробке: 100 x 21 x 75 см

Вес: 13,5 кг.

Вес в коробке: 15,5 кг

Сертификаты:



Генеральный импортер в России:

ООО «Альфа БС»

109518, Москва,
ул. Грайвороновская, д.4 стр.1

тел: (495) 229-45-32

факс: (495) 229-45-33

Эл. адрес: info@casada.ru

Адрес в интернете: www.casada.ru

Авторское право на изображение и тексты принадлежит «Casada International GmbH» они не могут быть использованы иначе, нежели с явного согласия владельца.

Авторское право © 2012 г. Casada International GmbH

Все права защищены.